

SOFTINJECT® Autoiniettore


Il **SOFTINJECT®** è un autoiniettore progettato per la somministrazione sottocutanea o intracavernosa di farmaci utilizzando **siringhe in plastica monouso da insulina con ago fisso** tipo:

- **BD Micro-Fine™+ 1ml con Ago fisso**
29GX12,7 mm
- **PIC Insumed 1ml con Ago fisso**
30GX12,7 mm

- Siringhe equivalenti

Particolari del SOFTINJECT®

Particolari : A = Puntale regolabile B = Corpo inferiore C = Bottone avanzamento siringa D = Finestra fine iniezione F = Corpo superiore H = Clip di sicurezza L = Pulsante di scatto M = Protezione ago

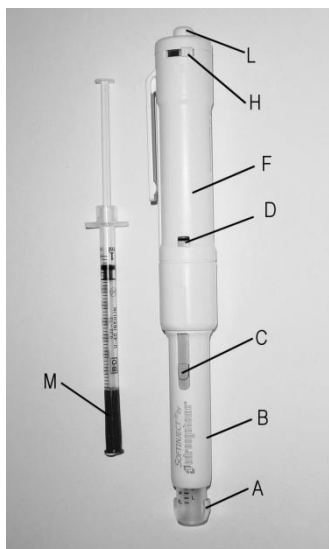


ISTRUZIONI D'USO

Preparazione

ATTENZIONE: prima dell'uso assicurarsi che l'autoiniettore sia un perfetto stato di conservazione e perfettamente funzionante




- Predisporre l'autoiniettore nella posizione di sicurezza ruotando la *Clip (H)* fino allo scatto nella posizione colore rosso
- Svitare il Softinject

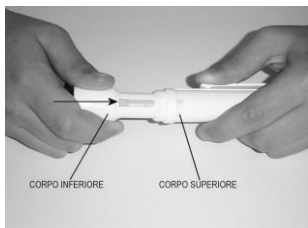

- Caricare il pistone posizionato nella parte interna del *Corpo superiore (F)* introducendo nello stesso il *Corpo inferiore (B)* esercitando una leggera pressione fino ad avvertire lo scatto di avvenuto caricamento del pistone



- Inserire la siringa precaricata con il giusto dosaggio nel *Corpo inferiore (B)* senza rimuovere la protezione dell'ago.
- Avvitare i due corpi dell'autoiniettore. Non forzare la filettatura. Il Softinject ora è pronto per l'uso e se la sicura è inserita (colore rosso) sono evitati gli scatti accidentali.

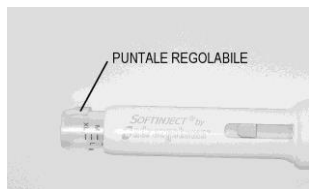


- La profondità di iniezione dell'ago può essere regolata ruotando il *Puntale (A)* trasparente. Sono possibili quattro differenti posizioni:

- S- Corta (6 mm)
- M- Media (8 mm)
- L- Lunga (10 mm)
- XL- Molto lunga (12 mm)

Ora il Softinject è pronto per l'uso

Iniezione

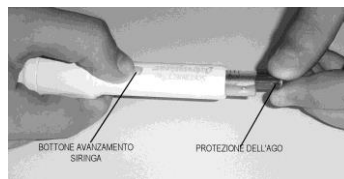

- Tenere l'autoiniettore in posizione verticale e puntando verso il basso spingere il *Bottone avanzamento siringa (C)* per far fuoriuscire la protezione dell'ago.

- Rimuovere la protezione dell'ago

- Rilasciare il *Bottone avanzamento siringa (C)* e la siringa per effetto della molla interna rientrerà nel corpo dell'autoiniettore.

- Ruotare la *Clip (H)* di sicurezza fino alla comparsa del colore verde

- Pulire la zona di iniezione con un tampone imbevuto di disinfettante.

- Posizionare l'autoiniettore perpendicolarmente nella zona di iniezione con la *Finestra di fine iniezione (D)* rivolta verso di voi.

- Premere il *Pulsante di scatto (L)* e attendere la completa erogazione del farmaco fino alla comparsa del pistone nella *Finestra di fine iniezione (D)* dopo circa 10 sec.



Dopo l'iniezione

- Estrarre l'ago togliendo l'autoiniettore.
- Effettuare una leggera pressione sul punto di iniezione con un tampone imbevuto di disinfettante.

ATTENZIONE: in caso di sanguinamento continuare ad esercitare la pressione fino all'arresto dello stesso.

- Inserire la sicura
- Svitare i due corpi dell'autoiniettore
- Rimuovere la siringa
- Rimettere il cappuccio di protezione dell'ago
- Gettare la siringa
- Riporre l'autoiniettore nell'apposito contenitore

La siringa e l'ago possono essere utilizzati una sola volta e gettati negli appositi contenitori per lo smaltimento.

Conservazione e Manutenzione

Il Softinject® deve essere trattato con cura evitando situazioni che possano danneggiarlo. Proteggerlo dalla polvere e conservarlo quanto più possibile nel suo astuccio.

Per la pulizia usare del cotone imbevuto con detergente delicato. Per evitare di danneggiarlo non lavarlo, lubrificarlo o immergerlo nell'alcool. Eliminare lo sporco o la polvere con uno spazzolino morbido.

Il Softinject® deve essere utilizzato secondo quanto descritto nelle istruzioni d'uso. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio del Softinject

Precauzioni di sicurezza

- ✚ Non tentare di riparare l'autoiniettore difettoso
- ✚ Non scaricare l'autoiniettore a vuoto senza siringa perché si potrebbe danneggiare il meccanismo di aggancio del pistone
- ✚ Non rivolgere l'autoiniettore verso sé stesso o verso gli altri.
- ✚ Prima dell'utilizzo assicurarsi del buon funzionamento dell'autoiniettore

Fabbricante e Distributore:

ANDROSYSTEMS SRL
Via Carlo Muscetta, 224
00139 Roma - Italia
☎ +39 320 63 85 191
@ clienti@androsystems.it
www.autoiniettori.it

CE 0373

IST SF 01/18

15/03/2018